

Bruksanvisning för MDT:s diamantbelagda böjliga remsor i rostfritt stål

BESKRIVNING

MDT diamantbelagda rostfria böjliga remsor är tillverkade av rostfritt stål belagda med diamant.

OMFATTNING

Dessa instruktioner gäller rengöring, desinfektion och sterilisering av MDT:s diamantdentalremsor före första användning och efter varje efterföljande återanvändning.

MDT:s diamantbelagda rostfria böjliga remsor levereras mekaniskt rena, men INTE sterila.

INDIKATIONER FÖR ANVÄNDNING

MDT:s diamanttandremсор är böjliga enheter som kan hanteras med båda händerna.

Remsorna är återanvändbara enheter avsedda för manuellt bruk vid flera olika tandbehandlingar. De är utformade för att förpolera, konturera, finpolera och högglangspolera interproximala områden av kompositlagningar och/eller att användas vid interproximal reduktion av emalj. Vissa används för finish av interproximala lagningar, tillsammans med interproximal emaljreduktion under ortodonti.

Yrkesmässig användning: Dentalremsorna är avsedda för tandvård och får endast användas av tandläkare och andra kvalificerade yrkespersoner som är bekanta med användningen av dessa enheter och deras upparbetning – utifrån utbildning och erfarenhet. Därför behövs ingen användarutbildning för att säkerställa specifierad prestanda, säker användning och upparbetning av den medicinska produkten.

PATIENTPOPULATION: Patienter som behöver tandvård.

**CONTROLLED
DOCUMENT**

KONTRAINDIKATIONER:

- Remsorna innehåller nickel och ska inte användas för personer med känd allergi mot denna metall, eftersom det kan orsaka överkänslighet.
- Alla allvarliga incidenter som har inträffat kopplat till vår enhet måste rapporteras till MDT (på adressen nedan) och till den behöriga myndigheten i den medlemsstat där användaren eller patienten bor.

TRANSPORT, FÖRVARING OCH BEHANDLING AV NYA INSTRUMENT FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNING

- Tandremсорna ska alltid transporteras i originalförpackningen.
- Förvara alla originalförpackade enheter på en ren och torr plats i rumstemperatur.
- Remсорna är inte förpackade under sterila förhållanden och måste rengöras, desinficeras och steriliseras enligt anvisningarna före användning.
- Se till att inte böja remsorna när du packar upp dem.

VARNINGAR OCH FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

- Enheten ska användas enligt nedanstående instruktioner av tandläkare eller licensierad tekniker.
- Läs noga märkningen på förpackningen för att säkerställa att enheten används korrekt.

- c. För att undvika risk för kontaminering ska du rengöra och sterilisera remsorna som levereras i osterilt skick i enlighet med anvisningarna nedan – före första användning och före varje återanvändning.
- d. Se till att inte böja dem vid uppackning.
- e. Bär alltid handskar när du hanterar kontaminerade instrument.
- f. Ögonskydd måste bäras för att skydda mot utstötta partiklar.
- g. Kirurgiskt munskydd ska bäras för att undvika inandning av aerosol och/eller damm som bildas under användning.
- h. Använd inte sterilisering med torrvärme eller kemisk metod och inte heller kallsterilisering för att sterilisera remsor, då dessa processer inte har validerats för användning. Användning av dessa processer kan orsaka nedbrytning av enheten och kan leda till att den går sönder.
- i. Lämna inte diamanremsor i fuktig omgivning, då detta kan leda till korrosion.
- j. Om de ackumulerade resterna inte tas bort kan det leda till att enheten går sönder och skadar patienten eller användaren.
- k. Inspektera alltid remsan före användning avseende slitage, revor, rost, brott eller andra synliga skador. Använd inte skadade eller utslitna dentalremsor. Kassera dessa i enlighet med lokala regler. Användning av skadade slipremsor kan leda till att ingreppet tar längre tid, till skada på patienten eller användaren eller till att patienten aspirerar eller sväljer den trasiga enheten.
- l. Undvik överanvändning av dentalremsorna, eftersom slitage på enheten kan leda till skada på patient eller användare.

INSTRUKTIONER FÖR UPPARBETNING AV DIAMANTBELAGDA BÖJLIGA REMSOR AV ROSTFRITT STÅL

Omfattning

Instruktionerna för upparbetning nedan gäller endast återanvändbara remsor. Remsorna ska upparbetas vid första användningen och innan de återanvänds.

Begränsningar för återanvändning

- a. Upparbetning kommer att ha liten effekt på MDT:s diamanbelagda böjliga remsor av rostfritt stål.
- b. Remsornas livslängd bestäms av slitage, minskad slipseffekt och skador under användning.
- c. Remsorna ska inspekteras avseende defekter under den preliminära rengöringsprocessen.
- d. Fördröjningen mellan användning och upparbetning måste hållas till ett minimum för att undvika föroreningar.
- e. Långvarig förvaring i desinfektionslösningar kan leda till korrosion och till skador på enheten och bör därför undvikas.
- f. Lämna inte remsor nedsänkta i desinfektionsmedel som har en fixerande verkan (som aldehydbaserade produkter) om de inte har rengjorts noga först.

Varningar

- 1. Rengöringsmedel med klor eller klorid som aktiv ingrediens är frätande för rostfritt stål och får inte användas. Rengöringsmedel med neutralt pH är att föredra.
- 2. Använda remsor ska betraktas som kontaminerade efter användning. Därför bör lämpliga försiktighetsåtgärder vidtas vid upparbetning och kassering. Lämpliga handskar, ögonskydd och munskydd ska bäras vid upparbetning. Andra åtgärder kan krävas om det finns specifika risker för infektion eller korskontaminering från patienten.
- 3. Använda remsor betraktas också som en biologisk fara och måste kasseras som biologiskt riskavfall i enlighet med lokala regler – om inte upparbetningen har utförts i enlighet med instruktionerna.
- 4. Använd inte kallsterilisering för att sterilisera diamanbelagda remsor. Sådana medel innehåller ofta starka oxiderande kemikalier som kan angripa det substrat som binder diamanpartiklarna till stålämnen.

- 5) Felaktiga förpackningar måste betraktas som osterila. Instrumenten måste packas om och steriliseras om.

FÖRVARING

Remsorna ska förvaras i steriliseringsbehållaren (ställ eller påse) tills de behövs.

Behållare och påsar måste torkas innan de öppnas för att undvika återkontaminering av innehållet med vatten.

Förvaring under torra, rena förhållanden och vid rumstemperatur.

VALIDERING AV RENGÖRING OCH ÅNGSTERILISERING

Ovanstående detaljerade processer *har validerats* för att kunna förbereda MDT:s tandremсор för återanvändning. Det är fortfarande uppdragsansvar att säkerställa att bearbetningen som den utförts i praktiken, med uppdragsanläggningens utrustning, material och personal, verkligen har uppnått nödvändigt resultat. Alla avvikelser från dessa instruktioner bör utvärderas korrekt avseende effektivitet och eventuella negativa resultat.

SPÅRBARHET

På etiketten av varje förpackning anges ett **partinummer** LOT.

Detta nummer måste anges i all korrespondens som rör produkten.

ORDLISTA MED SYMBOLER

	Katalognummer/artikelnnummer
	Partikod/-nummer
	Tillverkare
	Se bruksanvisningen.
	Osteril produkt
	Bär munskydd och ögonskydd vid användning
RxOnly	(ref. US FDA CDRH) ENHET endast för yrkesmässigt bruk
	Unikt identifieringsnummer
	Medicinsk enhet
	Håll torrt
	Tillverkningsdatum

	Importör
---	----------

Kontaktinformation

 Tillverkare	MDT, Micro Diamond Technologies Ltd. Ha'amal 2St., Afula 1857107, Israel Phone: +972-4-6094422 Fax: +972-4-6597812 Email: info@mdtdental.com Web: www.mdtdental.com
EU REP Auktoriserad representant för den Europeiska gemenskapen	Obelis S.A Bd. Général Wahis 53 1030 Bryssel, Belgien Tfn: + (32) 2 732 59 54 Fax: +(32) 2 732 60 03 E-post: Mail@Obelis.Net
 Översättning	AbroadLink Translations Castellana Business Center C/Paseo de la Castellana 40, 8th Floor 28046, Madrid.




Rini Lahav, M.Sc.
CTO QARA
Director, PRRC
MDT Micro Diamond Technologies Ltd.